


クライオ・エレクトロポレーション

WRINKLE CLEAR

クリニックを超える
施術をサロンでも

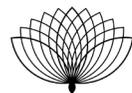

ETERNAL BEAUTY GLOBAL

目次

WRINKCLEAR

設定・操作マニュアル

- ・ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためこのマニュアルを必ずお読みください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いいたします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。

目次、注意事項	2
クライオ・エレクトロポレーション（CEP導入）とは	3
WRINKCLEAR 最大の特徴	4
製品仕様	5
付属品と各部の名称	6
初期設定から作動まで	7
施術方法	8
よくある質問	9
エラー表示について	10

施術後のアフターケア

- ・当日から洗顔、スキンケア、化粧が可能です。
- ・施術後は紫外線の影響を受けやすい状態となっておりますので紫外線対策を行ってください。
- ・施術後、血流循環が良くなり赤みが出たり、長引く恐れがございます。
- ・好転反応といって一時的に老廃物を排出しようとしてニキビや赤い発疹が出ることもございます。

製品について

- ・本製品の品質や性能・品質向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- ・保管状況によってはヘッドの形状が変わる恐れがあります。使用後はヘッドをアルコールで皮脂等拭き取り後、乾いたタオルで拭き取り、高温多湿は避けて保管してください。
- ・パッドが四隅にピッタリ貼れていないと一部だけに電流が流れてしまうため、火傷をしてしまう可能性がございます。

次の人には使用しないでください

- ・ペースメーカーを使用している方
- ・ヒアルロン酸注入、ボトックス注射等を受けて3ヶ月以内の方
- ・金の糸リフトを受けている方（金以外は施術可能です）
- ・妊娠している方など


美容クリニックでも採用を頂いている本格的なエレクトロポレーション

エレクトロポレーションでは、特殊な電気パルスで細胞膨張をおこし、皮膚の細胞間に隙間をつくり、通常では浸透しない美容成分を肌の奥まで届けます。※化粧品の塗布だけでは奥まで浸透せず表皮への効果しか得られません。

美容有効成分が、お肌の真皮層までしっかり浸透


イオン導入の20倍の浸透力！

有効成分を肌の深層部まで届けることで、肌悩みの解消はもちろん、肌そのものを悩みが起こらない健康的な肌に通じます。

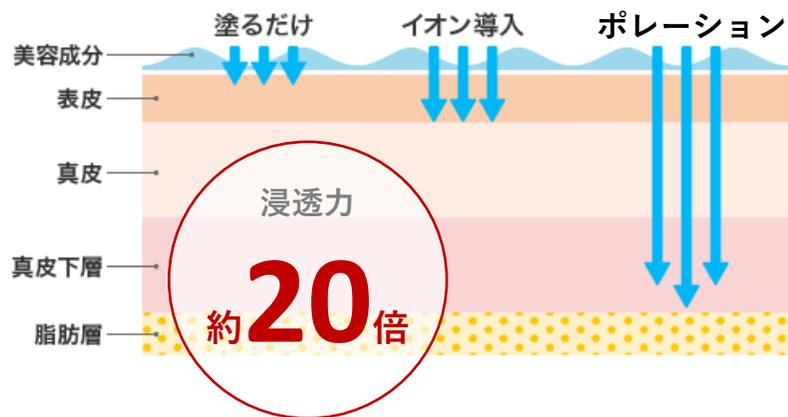

冷温システム搭載

温めて高濃度の美容成分を大量に肌の奥まで浸透させ、急速に冷やす事で美容成分を肌の中に留めることができます。

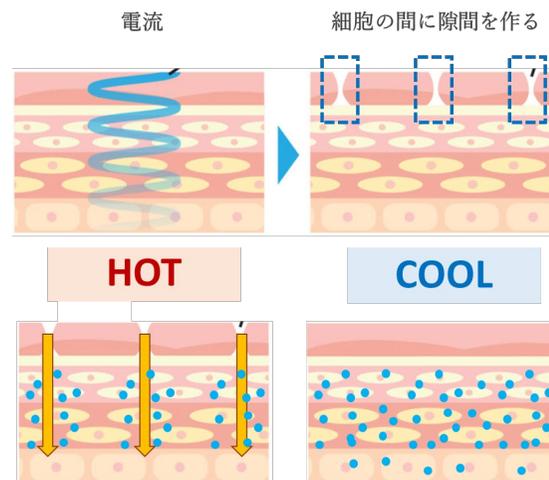


WRINKLCLEAR最大の特徴

最新のモノポーラ式の採用！

皮膚の表面に電流（パルス電流）を流すことで、細胞膜に一時的な孔を形成し、通常は通過することが難しい有効成分を肌の深部まで浸透させる機器です。主に「モノポーラ式」と「バイポーラ式」「マルチポーラ式」の3種類に分かれます。それぞれ効かせる皮膚層や目的が異なります。

最新のモノポーラ式

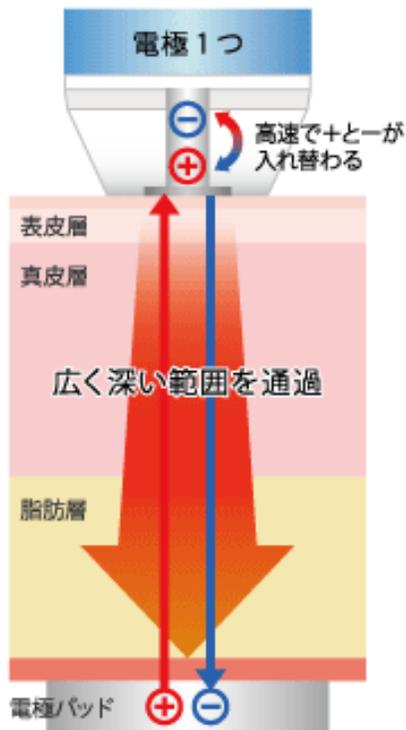


顔から対極の電極パッドを貼っている背中に体内を通過して電流が流れます（※）

※体内に電流が流れますが、微弱電流ですので身体への影響はありません。




対極板なし

バイポーラ式

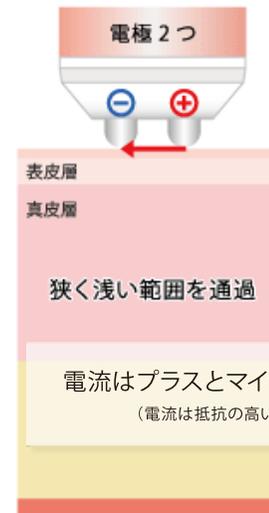

マルチポーラ式

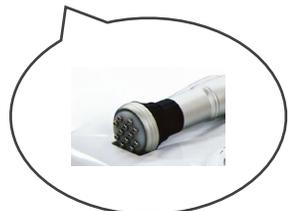

製品仕様

強 度	0100(1step)	温 度	COLD : -15 ~ 20°C、HOT : 21 ~ 40°C
	パルス+ : 5000 で最大24Vp-p ± 15%	タイプ	水冷方式
	パルス- : 5000 で最大24Vp-p ± 15%		
モード	パルス+ : 0.5KHz 10KHz	電 源	100-240V、50/60Hz
	パルス- : 0.5KHz 10KHz	サイズ	W270×D245×H170mm
時 間	1分~20分 (1分ごと)	重 さ	5.0Kg
周波数	パルス+ : Active/ Rest → sous 1.000μS	サロン価格 (税別)	480,000
	パルス- : Active/ Rest → 5011S 1.000μS	販売元	株式会社ETERNAL BEAUTY GLOBAL

マシン保守 : 1年間 ※1年後はオプションにて対応

保守契約料金は修理費の他、点検・一般故障修理時に使用する部品代が無償（一部対象外）で受けられ、敏速かつ優先的にメンテナンスサポートを受けることができます。導入日から1年間、障害発生時には何度でもメンテナンスサービスを受ける事が出来ます。

修理期間が長引く場合はデモ機を無料で貸出しております。

各部名称

付属品



ハンドピース



導電接続線



電源アダプタ




じょうご




チューブ2本

操作画面

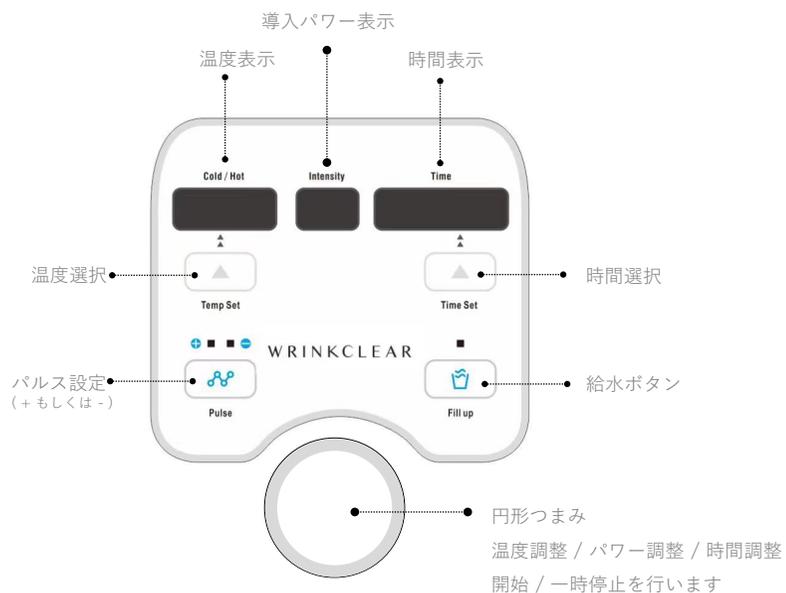

背面

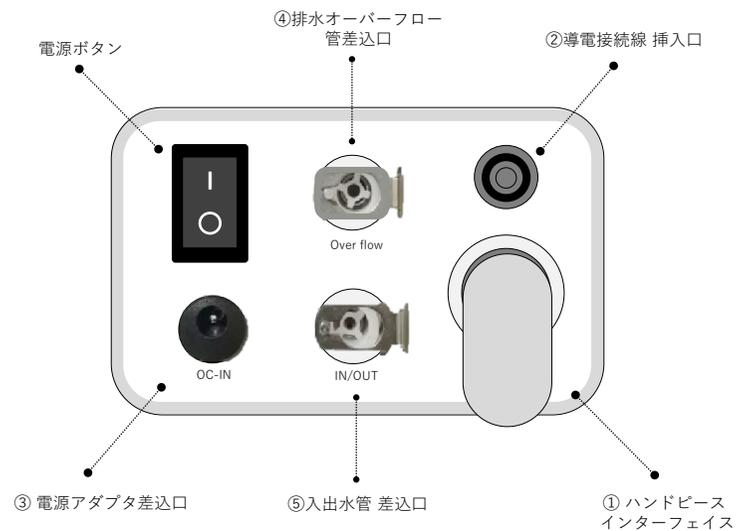

初期設定から作動まで

- 1 付属品を機器背面の① - ⑤ に差し込みます。 ※前ページ参照
- 2 付属品のセットが完了したら電源ボタンを○にし、機器を立ち上げます。スタート初めは本体に水が充分に入っていないため、電源を入れると自動的にアラーム音が数回鳴ります。(EER 2000) (出荷時にテストをしているためエラーにならない場合もあります。)
- 3 給水ボタン (正面右下のバケツマーク) を押し、じょうごをホースとつなげ、入水管(VENT) から精製水を注ぎます。
- 4 本体の水が満たされると、上の (Over flow) につないだホースから水が出てきます。
- 5 本体に水が回る音が聞こえたら、挿入口のつまみを押し、入水管 (IN/OUT) と排水管 (Over flow) を外します。
- 6 温度調整：温度選択ボタンを押してから、“円形つまみ”を回し温度調整を行います。時計回りに回すと温度が上がり、反時計回りに回すと温度が下がります。温度目安 (暖感:36°C / 冷感: -5°C)
- 7 時間調整：時間選択ボタンを押して、“円形つまみ”を回し時間調整を行います。時計回りで時間が増加し、反時計回りで時間が減少します。
(暖感: 10分 / 冷感:10分 / 合計: 20分) ※電源をONにするとデフォルトで20分と表示されます
※施術時間は必ずしも決められたものではなく、施術の目的、お客様の状態によって異なります
- 8 温度を調整した後、“円形つまみ”を押すと、機器本体が作動し始めます。本体が正常に作動すると“円形つまみ”が点滅します。
(温度が 20 °C 未満の場合、円形のノブは青色の光を表示し、温度が 21 °C を超えると、円形のノブは赤色の光を表示します)
- 9 電力調整：作動した状態で“円形つまみ”を時計回りに回し、電力(Intensity)の調整を行います。(電力目安:15~30)
パワーをあげていただいた方が早く効果が期待できますが、初めての方や施術に慣れていない方は心地よい範囲で行ってください。
特におでこや顎は骨に近いので、お痛みを感じやすいです。その場合には、5~15に下げて施術してみてください。

施術方法

STEP01



洗顔 / クレンジング

メイクを落とし、洗顔を行い、お肌の汚れを取った状態でトリートメントを行います。

STEP02



導電性シール

電極パットをグストの肩(上部僧帽筋)に貼り、機器をスタートさせます。*背面に貼ります

STEP03



美容液を塗布

導入美容液を顔に塗布します。トリートメントは常に美容液でお肌が濡れた状態で行ってください。

STEP04



頬

ほうれい線と小鼻の横を通りこめかみまで、ハリのない肌をケア。

STEP05



あご、口元

ヘッドの端子を肌に密着させ、あご下から耳までゆっくりとヘッドを動かしフェイスラインにアプローチ。

STEP06



フェイスライン

あごから小鼻に向けて(ほうれい線の上)下から上に。肌が引きしまった口元へ。

STEP07



目元

目頭からこめかみにかけて、目元のケア。

STEP08



額

額の中心から外側に向かって、額のラインをなめらかに。

STEP09



デコルテ

最後に耳の下から肩にかけてゆっくりとヘッドを動かします。

STEP10



肌整

オプションでフェイスマスクを行います。またローション→ミルク→クリームの順に塗布し肌を整えます。

※③ - ⑨ を温感トリートメント10分行き、冷感トリートメントで繰り返し10分行います。

※イオン導入と同様、液剤がエレクトロポレーションの電極に引き寄せられてしまうと、いくら細胞膜に隙間を作ったところで奥深くまで浸透できません。イオン導入と同様にパルス設定で電極を切り替える必要がございます。基本的な施術は(+)で大丈夫ですが、毛穴の洗浄(導出)などは(-)で、ビタミンC原料はマイナス電子を帯びておりますので、導入も(-)で施術を行ってください。

よくあるご質問


質問	内容
<p>施術中にすぐに美容液がなくなり、お肌が乾いてしまう気がします。何が原因でしょうか</p>	<p>エレクトロポレーションはイオン導入の20倍の浸透力があるので、美容液がお肌に浸透している証拠です。美容液が足りない場合はローションを追加して施術をしてください。</p>
<p>肌がビリビリと刺激が強い感じがします</p>	<p>体感に個人差がありますので、不快に感じるようであればパワーを弱めて下さい。おでこなど皮膚が薄い場所は電気を感じやすいのでパワーを弱めて頂くことをおすすめします。パワーを下げてもお痛みを感じる場合は、電極パッドを二の腕に貼っていただくと電流の流れが緩やかになりお痛みが軽減されます。</p>
<p>電極パッドは消耗品ですか？ 電極パットの粘着が落ちてきたような気がする</p>	<p>パッドが皮膚に付いていれば電流が流れますので、粘着が弱まると電流の流れが悪くなり効果が弱まってしまうます。その場合には、皮脂をお水やアルコールで拭き粘着を少し復活させたり、中性洗剤で洗って完全に乾かしてから使っていただいております。</p> <p>上記でも改善しない場合は買い替え時ですので、ネットなどでお好きなEMS用の電極パットをお買い求めください。</p>
<p>導入中にぼろぼろと垢のようなものが出てくる</p>	<p>2つの可能性があります。</p> <p>(1) ベースが乾燥していて表面が乾燥したままの状態だから、摩擦から垢が出てしまったり、ターンオーバーの角質が垢のように出てきしまった</p> <p>(2) 中に入り切れなかった導入剤が摩擦によって玉になったり垢が出ている</p>

よくあるご質問

質問	内容
パワーは強い方 が効果ができるのは早いですか？	パワーが強いほど、施術の効果は早く感じられます。ただし、パワーが強すぎると、お客様が施術に対して恐怖心を抱いてしまう可能性があります。そのため、最初は「 痛気持ちいい 」と感じる程度のパワーで施術を行い、回数を重ねるごとに少しずつパワーを上げていくのがおすすめです。お客様の痛みに対する慣れに合わせて調整していきましょう。
効果 はどれくらい持続しますか？	エレクトロポレーションの効果の持続期間は、施術の種類、使用される製品、そして個々の肌の状態に大きく依存します。2週間から1ヶ月間隔で受けていただくことをおすすめしております。
ハーブピーリング との組み合わせでも問題ありませんか？	ハーブピールは、異物を肌に導入し、それを排出しようとする自然治癒力を利用して肌を回復させる施術です。この特性から、ピーリング後にポレーションを併用することで相性が良く、相乗効果が期待できます。ハーブとポレーションを組み合わせることで治癒力がさらに高まり、より早く結果が現れる傾向があります。
まぶたのうえ もかけていいですか？	はい、大丈夫です。コンタクトレンズのみ外していただけますようお願いいたします。
施術後に 肌が赤くなった	エレクトロポレーションによって皮膚が刺激されると、自然な防御反応として血流が増加します。この血流の増加が、皮膚に赤みをもたらすことがあります。通常、エレクトロポレーション後の赤みは一時的であり、適切なケアと休息をすれば数時間から数日で自然に引いていきます。しかし、赤みが長引いたり、他の症状（痛み、腫れ、発疹など）が現れた場合は、医師に相談することが重要です。

エラー表示について

エラー番号	内容	対応策
E100	マシン内の水量が足りていないことが原因です。	一度精製水の入れ替え作業を行い、十分に精製水が入っていることをご確認ください。 十分に入っても機械が精製水を検知しない場合があります。その際は一度電源を入れなおしてください。
E200/E800	サーミスタ線の接触不良が原因です。 (機械内部にある温度計)	一度弊社までご連絡ください。 kanri@e-eternal-global.com キャンペーンにご参加いただいているお客様で、ご導入から1年未満の場合は、早急に新しいものをお送りいたします。
ERR2000	初期設定前の水不足です。	入出水管(IN/OUT) から注射器orじょうごで精製水を注ぎ、上の (Overflow) につないだホースからお水が出て、本体に十分に精製水が貯まればエラー表示が消えます。

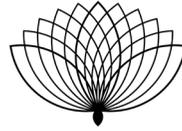

ETERNAL BEAUTY
GLOBAL

お問合せ

0120-331125

(平日：10:00～18:00)

メールでの問い合わせの場合

kanri@e-eternal-global.com



導入店様専用
サポートLINE



ETERNAL BEAUTY GLOBAL
公式インスタグラム